



EMSAN®

NATÜRLICHE PFLEGE DER ATEMWEGE

Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

EMSAN® BABYNASENTROPFLÖSUNG

Medizinprodukt

Emsan® Babynasentropflösung löst aktiv zähen, fest-sitzenden Schleim bei Schnupfen. Das macht die Nase frei. Durch die Befeuchtung der Nase mit wichtigen Mineralien werden die natürlichen Reinigungsmechanismen unterstützt und die Abwehrkräfte gestärkt.

Emsan® Babynasentropflösung ist eine Mineralstofflösung, die speziell für die besonderen Bedürfnisse einer Schnupfennase entwickelt wurde. Die Mineralien sind sorgfältig auf die natürlichen Verhältnisse der Nasenschleimhaut abgestimmt. Emsan® Babynasentropflösung ist daher für alle Altersgruppen und in allen Situationen ohne Bedenken einsetzbar.

Die Ampullen ermöglichen einen einfachen und hygienischen Gebrauch.

Zusammensetzung:

100 ml Lösung enthalten: 1 g Mineralsalzmischung, Gereinigtes Wasser. (Zusammensetzung der Mineralsalzmischung in g/kg: Natürliches Quellsalz 50, Natriumhydrogencarbonat 205, Natriumchlorid 725, Kaliumsulfat 20).

- Natriumhydrogencarbonat zur besseren Lösung zäher, festsitzender Sekrete und Neutralisierung entzündlicher Stoffwechselprodukte
- Kaliumsulfat zur Unterstützung der Schleimhautabschwellung und Verbesserung der Durchblutung
- Natürliches Quellsalz zur Remineralisierung und Revitalisierung der Nasenschleimhaut

Emsan® Babynasentropflösung ist garantiert frei von Konservierungsstoffen und allergieauslösenden pflanzlichen Substanzen.

Zweckbestimmung und Anwendungsgebiete:

Emsan® Babynasentropflösung befeuchtet, reinigt und befreit die Nasenschleimhaut bei Schnupfen mit vermehrter Schleim- und Schleimpfropfbildung.


Dosierung und Dauer der Anwendung:

Bei Babys bis zur Vollendung des 1. Lebensjahres: je nach Bedarf mehrmals täglich 1-2 Tropfen Emsan® Babynasentropflösung in jedes Nasenloch träufeln. Bei Kleinkindern von 1-3 Jahren: je nach Bedarf mehrmals täglich 1-3 Tropfen Emsan® Babynasentropflösung in jedes Nasenloch träufeln. Bei Kindern ab 3 Jahren und bei Erwachsenen: je nach Bedarf 1-3 mal täglich die Hälfte einer Ampulle Emsan® Babynasentropflösung in jedes Nasenloch geben. Wir empfehlen eine Verwendung der Emsan® Babynasentropflösung bei Raumtemperatur.


Verwenden Sie Emsan® Babynasentropflösung nicht länger als 30 Tage ohne Unterbrechung. Nach einer Unterbrechung von mindestens 2 Tagen kann Emsan® Babynasentropflösung wieder verwendet werden.

Sollten sich die Beschwerden trotz der Verwendung von Emsan® Babynasentropflösung nicht innerhalb von 3 Tagen bessern, empfehlen wir das Aufsuchen eines Arztes.

Art der Anwendung:

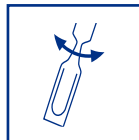

1. Ampulle durch Abdrehen der oberen Kappe öffnen.

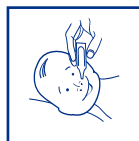

2. Das Baby hinlegen oder den Kopf zurückneigen und die Ampullenöffnung an das Nasenloch halten.




3. Die Ampulle sanft zusammendrücken, um die nötige Menge Lösung in die Nase tropfen zu können.



EMSAN®

NATÜRLICHE PFLEGE DER ATEMWEGE

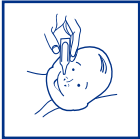

4. Bei der anderen Nasenöffnung den Vorgang wiederholen.



5. Nach kurzer Einwirkzeit den Kopf wieder anheben und die überflüssige Flüssigkeit abtupfen.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Kinder:

Die Anwendung kann für alle Altersgruppen, für Babys, Kleinkinder, Kinder und Jugendliche empfohlen werden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Die Anwendung während der Schwangerschaft und Stillzeit kann empfohlen werden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Erläuterung der Symbole:



Herstellungsladung



Verfallsdatum



Nur für den Einmalgebrauch



Hersteller



Bitte Packungsbeilage beachten!



Die Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie werden eingehalten.



Nicht unterhalb 4 °C und nicht oberhalb 50 °C lagern.

Stand der Information:

März 2019

Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH · Mainzer Str. 1c · DE-56130 Bad Ems
www.emcur.com · service@emcur.com



Gesundheitstipp:

Was tun, wenn der Hals kratzt?

Bei Entzündungen in Hals und Rachen helfen Emsan® Kinderhalstabletten. Das Halsschmerzmittel für Kinder wirkt rein natürlich: Die gereizte Rachenschleimhaut wird befeuchtet und zähe Beläge werden aktiv gelöst. Das sorgt für Linderung von Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und Hustenreiz.