



**EMSAN®**  
NATÜRLICHE PFLEGE DER ATEMWEGE

Gebrauchsanweisung, bitte aufmerksam lesen!

## EMSAN® NASENBALSAM

Medizinprodukt

### **Liebe Anwenderin, lieber Anwender,**

Sie haben sich für ein Medizinprodukt entschieden, das auf Basis hochwertiger Weißer Vaseline hergestellt ist. Emsan® Nasenbalsam bildet in der Nase einen feinen Schutzfilm auf der Nasenschleimhaut, der die Feuchtigkeitsabgabe reguliert und das Eindringen von Schadstoffen erschwert. Inhaltsstoffe verschiedener ätherischer Öle sorgen für ein feines Aroma und erzeugen ein angenehmes Frischgefühl ohne Reizung der Schleimhaut. Als Wirkstoff ist natürliches Mineralsalz als rein natürlicher Feuchthaltefaktor enthalten. Es unterstützt mit seinen Mineralstoffen und Spurenelementen die Regeneration der Schleimhäute.

### **Zusammensetzung:**

10 g (2 g) Nasensalbe enthalten: 600 mg (120 mg) natürliches Mineralsalz. Weitere Bestandteile sind: Weißes Vaseline, Dickflüssiges Paraffin, naturidentische Aromastoffe (bestehend aus einer Mischung aus Eucalyptol, racemischem Campher, Bornylacetat, Levomenthol, Kamillenöl), natürlicher Farbstoff Chlorophyll-Kupfer-Komplex.

Emsan® Nasenbalsam ist garantiert frei von Konservierungsstoffen.

### **Anwendungsgebiete:**

Zur Befeuchtung und Feuchthaltung bei trockener und/oder gereizter Nasenschleimhaut, Schnupfen und ständigem Schnäuzen, starker Krusten- und Borkenbildung.

Zur Barrierebildung bei Heuschnupfen und Hausstauballergie.

### **Dosierungsanleitung:**

Je nach Bedarf mehrmals täglich, insbesondere abends vor dem Zubettgehen ein linsengroßes Stück Nasensalbe tief in beide Nasenöffnungen einbringen und durch Andrücken der Nasenflügel in der Nase verteilen oder einfach auf die inneren Nasenflächen und die Haut um die äußere Nasenöffnung mit dem Finger oder einem Wattestäbchen auftragen. Starkes Aufziehen von Emsan® Nasenbalsam in die Nasenhöhle ist unbedingt zu vermeiden, um ein eventuelles Mitreißen der Nasensalbe in die tieferen Atemwege zu verhindern.

Nach der Anwendung sollte der Tubenansatz abgewischt und die Tube gut verschlossen werden. Aus hygienischen Gründen sollte eine Tube Emsan® Nasenbalsam nur von einer Person verwendet werden.

### **TIPP:**

Bei Hausstauballergie abends vor dem Schlafengehen erst Nasespülen (siehe Gesundheitstipp) und dann Emsan® Nasenbalsam auftragen. Der Schutzfilm wirkt am besten, wenn die Nase zuvor gründlich gereinigt und befeuchtet wird. Bei Borkenbildung erst die Nase spülen und danach Emsan® Nasenbalsam auftragen, um die Borkenbildung zu erschweren.



# EMSAN®

NATÜRLICHE PFLEGE DER ATEMWEGE

## Gegenanzeigen:

Emsan® Nasenbalsam darf nicht angewendet werden bei:

- Verletzungen von Nasendach und Nasennebenhöhlen mit offenen Verbindungen zwischen Nase und Gehirn
- bekannte Überempfindlichkeit gegenüber den oben genannten Inhaltsstoffen.

Emsan® Nasenbalsam darf auch nicht angewendet werden bei Säuglingen und Kleinkindern unter 2 Jahren (Gefahr eines Kehlkopfkrampfes) und bei Patienten mit Bronchialasthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von Emsan® Nasenbalsam kann bei diesen Patienten zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen. Risiken bei der Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit sind bisher nicht bekannt.

## Anwendungsdauer:

Bisher sind keine Begrenzungen für die Dauer der Anwendung von Emsan® Nasenbalsam bekannt.

## Nebenwirkungen:

In Einzelfällen kann es zu einem Niesreiz, Juckreiz oder Brennen sowie Schleimhautreizungen kommen. Bei Patienten mit ausgeprägt überempfindlichem Bronchialsystem kann es selten reflektorisch zu Atemnot kommen. In diesen Fällen sollte Emsan® Nasenbalsam abgesetzt werden und falls erforderlich eine symptomatische Therapie eingeleitet werden.

## Bitte beachten:

Das Verfallsdatum dieser Packung ist außen aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum! Bewahren Sie diese Packung unzugänglich für Kinder auf!

## Darreichungsform und Packungsgröße:

Emsan® Nasenbalsam ist in 2 g und 10 g Packungen im Handel erhältlich.

## Erläuterung der Symbole:



Herstellungsladung



Bitte Packungsbeilage beachten!



Verfallsdatum



Nicht über 25 °C lagern



Die Anforderungen der Medizinprodukterichtlinie werden eingehalten

Stand der Information: Juli 2016



**EMCUR®**

Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH

Mainzer Str. 1c · DE-56130 Bad Ems

[www.emcur.com](http://www.emcur.com) · [service@emcur.com](mailto:service@emcur.com)



## Gesundheitstipp:

Nase spülen – besser fühlen!

Bei Schnupfen, trockener Nase (z. B. durch Heizungsluft oder Klimaanlage) oder bei Pollenallergie schaffen regelmäßige Nasenspülungen mit der Emsan® Nasendusche und Nasenspülsalz auf natürliche Weise Linderung. Ihre Nase wird auf gründliche und dabei schonende Weise gereinigt. Durch die Spülung werden Krankheitserreger, Allergene und Schmutzpartikel einfach aus der Nase gespült.

Tipp bei Heuschnupfen: Vor der Pollenbelastung Emsan® Nasenbalsam auftragen und nach der Pollenbelastung die Nase spülen.